

REDUKTOR MEDYCZNY – załącznik IFU/RED/1/W8/SZ

REDUKTOR CIŚNIENIA Z SZYBKOZŁĄCZEM

Dotyczy:

LP.	NAZWA PRODUKTU	NUMER KATALOGOWY
1	Reduktor ciśnienia W8 O ₂ z szybkozłączem AGA	2.1/00/00
2	Reduktor ciśnienia W8 O ₂ z szybkozłączem DIN	2.1/02/02
3	Reduktor ciśnienia W8 AIR z szybkozłączem AGA	2.4/00/00
4	Reduktor ciśnienia W8 AIR z szybkozłączem DIN	2.4/01/00
5	Reduktor ciśnienia W8 N ₂ O z szybkozłączem AGA	2.5/00/00
6	Reduktor ciśnienia W8 N ₂ O z szybkozłączem DIN	2.5/02/01
7	Reduktor ciśnienia W8 CO ₂ z szybkozłączem AGA	2.7/00/00
8	Reduktor ciśnienia W8 CO ₂ z szybkozłączem fi6	2.7/00/01
9	Reduktor ciśnienia W8 N ₂ O z szybkozłączem fi8	2.5/00/02
10	Reduktor ciśnienia W8 O ₂ z szybkozłączem fi8	2.1/00/01

Montaż reduktora ciśnienia z szybkozłączem:

1. Należy upewnić się, że na gwincie przyłącza butli reduktora nie ma żadnych zanieczyszczeń.
2. Zdjąć (odkręcić) kaptur butli z gazem i minimalnie otworzyć (na chwilę) zawór, aby wydmuchać zanieczyszczenia, które znalazły się w kanale wylotowym.
3. Zamontować reduktor do butli z gazem:
 - Nakrętkę reduktora należy nakręcać ręcznie obrotami w prawo na zawór butli, dopóki obroty będą możliwe. Używać kluczy tylko z wkładką plastikową.
 - Pierścień uszczelniający pomiędzy zaworem butli i reduktorem spełnia swoją funkcję dopiero wtedy, gdy powstanie ciśnienie.

CZĘŚCI ZAMIENNE		
L.P.	Nazwa Części	Indeks Katalogowy
1	Manometr O ₂ /0-31,5/ MPa nr 30763754 *MRI*	2.1/11/04
2	Manometr AIR /0-25 MPa/ nr 30763801 *MRI*	2.4/04/01
3	Manometr N ₂ O /0-25 MPa/ nr 30763819 *MRI*	2.5/05/01
4	Manometr CO ₂ /0-10 MPa/ nr 31249286 *MRI*	2.7/04/02
5	Szybkozłącze SKG O ₂ /AGA/ /M10x1/, /G1/4/, /G3/8/	7.0/00/00
6	Szybkozłącze SKG AIR/ AGA/ /M10x1/, /G1/4/, /G3/8/	7.1/00/00
7	Szybkozłącze SKG N ₂ O /AGA/ /M10x1/, /G1/4/, /G3/8/	7.2/00/00
8	Szybkozłącze SKG CO ₂ /AGA/ /M10x1/, /G1/4/, /G3/8/	7.3/00/00
9	Szybkozłącze SKG O ₂ /DIN/ G 3/8", G1/4"	7.0/01/00
10	Szybkozłącze SKG AIR /DIN/ G 3/8", G1/4"	7.1/03/00
11	Szybkozłącze SKG N ₂ O /DIN/ G 3/8", G1/4"	7.2/01/00
12	Złączka wtykowa prosta G1/8 do węża 6 (szara) Nr kat.50020 6-1/8 GR	2.2/00/04
13	Łącznik reduktora z nakrętką O ₂ kpl.	2.1/06/11
14	Łącznik reduktora z nakrętką AIR kpl.	2.1/06/04
15	Łącznik reduktora z nakrętką N ₂ O kpl.	2.1/06/03
16	Łącznik reduktora z nakrętką CO ₂ kpl.	2.7/03/01
17	Membrana /fi 31/ kpl.	2.1/09/01
18	Zawór wysokiego ciśnienia kpl.	2.1/15/00
19	Zawór bezpieczeństwa kpl.	2.1/15/01
20	O-ring /13x2,5/ FPM 80 /miękkie/	2.1/38/01
21	O-ring /11.3x2.4/ 70 FPM	2.4/06/00
22	Podkładka N ₂ O fi 13,6x11,5x7,9x3,4	2.5/06/00
23	Podkładka CO ₂ fi 18,4x12,9x2	2.7/06/00