

REDUKTOR MEDYCZNY – załącznik IFU/RED/7/W8RC/SZ

REDUKTOR CIŚNIENIA REGULOWANY, SZYBKOSZŁĄCZE

Dotyczy:

LP.	NAZWA PRODUKTU	NUMER KATALOGOWY
1	Reduktor ciśnienia regulowany W8RC N ₂ O szybkozłączce AGA	2.14/00/00
2	Reduktor ciśnienia regulowany W8RC CO ₂ szybkozłączce AGA	2.14/01/00
3	Reduktor ciśnienia regulowany W8RC O ₂ szybkozłączce AGA	2.3/00/00
4	Reduktor ciśnienia regulowany W8RC AIR szybkozłączce AGA	2.3/01/00

Montaż reduktora ciśnienia (regulowanego), z szybkozłączcem:

1. Należy upewnić się, że na gwincie przyłącza butli reduktora nie ma żadnych zanieczyszczeń.
2. Zdjąć (odkręcić) kaptur butli z gazem i minimalnie otworzyć (na chwilę) zawór, aby wydmuchać zanieczyszczenia, które znalazły się w kanale wylotowym.
3. Zamontować reduktor do butli z gazem:
 - Nakrętkę reduktora należy nakręcać ręcznie obrotami w prawo na zawór butli, dopóki obroty będą możliwe. Używać kluczy tylko z wkładką plastikową.
 - Pierścień uszczelniający pomiędzy zaworem butli i reduktorem spełnia swoją funkcję dopiero wtedy, gdy powstanie ciśnienie.

CZĘŚCI ZAMIENNE		
L.P.	Nazwa Części	Indeks Katalogowy
1	Manometr O ₂ /0-31,5/ MPa nr 30763754 *MRI*	2.1/11/04
2	Manometr AIR /0-25 MPa/ nr 30763801 *MRI*	2.4/04/01
3	Manometr N ₂ O /0-25 MPa/ nr 30763819 *MRI*	2.5/05/01
4	Manometr CO ₂ /0-10 MPa/ nr 31249286 *MRI*	2.7/04/02
5	Manometr /0-1MPa/ nr 31140917 *MRI*	2.3/03/01
6	Szybkozłącze SKG O ₂ /AGA/ /M10x1/, /G1/4/, /G3/8/	7.0/00/00
7	Szybkozłącze SKG AIR/ AGA/ /M10x1/, /G1/4/, /G3/8/	7.1/00/00
8	Szybkozłącze SKG N ₂ O /AGA/ /M10x1/, /G1/4/, /G3/8/	7.2/00/00
9	Szybkozłącze SKG CO ₂ /AGA/ /M10x1/, /G1/4/, /G3/8/	7.3/00/00
10	Pokrętło reduktora RP,RC /białe/ + naklejka 3D	2.3/06/05
11	Pokrętło reduktora RP,RC /czarne/ + naklejka 3D	2.3/06/04
12	Pokrętło reduktora RP,RC /niebieskie/ + naklejka 3D	2.3/06/03
13	Śruba regulująca RP, RC	2.3/04/00
14	Łącznik reduktora z nakrętką O ₂ kpl.	2.1/06/11
15	Łącznik reduktora z nakrętką AIR kpl.	2.1/06/04
16	Łącznik reduktora z nakrętką N ₂ O kpl.	2.1/06/03
17	Łącznik reduktora z nakrętką CO ₂ kpl.	2.7/03/01
18	Membrana /fi 31/ kpl.	2.1/09/01
19	Zawór wysokiego ciśnienia kpl.	2.1/15/00
20	Zawór bezpieczeństwa kpl.	2.1/15/01
21	O-ring /13x2,5/ FPM 80 /miękkie/	2.1/38/01
22	O-ring /11.3x2.4/ 70 FPM	2.4/06/00
23	Podkładka N ₂ O fi 13,6x11,5x7,9x3,4	2.5/06/00
24	Podkładka CO ₂ fi 18,4x12,9x2	2.7/06/00