

**REDUKTOR MEDYCZNY – załącznik IFU/RED/14/RNC/ME/SZ****REDUKTOR NISKIEGO CIŚNIENIA RNC MEMBRANOWY, SZYBKOZŁĄCZE**

Dotyczy:

LP.	NAZWA PRODUKTU	NUMER KATALOGOWY
1	Reduktor niskiego ciśnienia RNC O <sub>2</sub> membranowy, szybkozłączce AGA	2.19/00/00
2	Reduktor niskiego ciśnienia RNC AIR membranowy, szybkozłączce AGA	2.19/04/00
3	Reduktor niskiego ciśnienia RNC CO <sub>2</sub> membranowy, szybkozłączce AGA	2.19/03/00
4	Reduktor niskiego ciśnienia RNC N <sub>2</sub> O membranowy, szybkozłączce AGA	2.19/01/00
5	Reduktor niskiego ciśnienia RNC O <sub>2</sub> membranowy, szybkozłączce DIN	2.19/16/00
6	Reduktor niskiego ciśnienia RNC AIR membranowy, szybkozłączce DIN	2.19/17/00
7	Reduktor niskiego ciśnienia RNC CO <sub>2</sub> membranowy, szybkozłączce DIN	2.19/18/00
8	Reduktor niskiego ciśnienia RNC N <sub>2</sub> O membranowy, szybkozłączce DIN	2.19/19/00
9	Reduktor niskiego ciśnienia RNC CO <sub>2</sub> membranowy, szybkozłączka fi6	2.19/10/00

**Montaż reduktora niskiego ciśnienia RNC membranowy, szybkozłączce:**

1. Reduktor należy ustawić w pozycji pionowej, następnie umieścić wtyk w gnieździe poboru gazu.
2. Przed umieszczeniem wtyku w gnieździe należy sprawdzić położenie kołka ustalającego który umieszczony jest na wtyku.
3. Po umieszczeniu wtyku w gnieździe należy delikatnie dociskać korpus reduktora prostopadle do gniazda, aż do momentu gdy zatrząsk unieruchomi wtyk.
4. Z gniazda powinien wydobyć się charakterystyczny dźwięk zatrzaśnięcia.
5. Zachowaj ostrożność przy montowaniu reduktora do gniazda gazu medycznego, aby nie doszło do uszkodzenia i rozszczelnienia instalacji!
6. Zwróć uwagę czy bolec kodujący wtyku znajduje się w prawidłowym położeniu w stosunku do gniazda!
7. Nigdy nie dociskaj reduktora do gniazda trzymając za manometr lub szybkozłączce! Może to doprowadzić do uszkodzenia reduktora!
8. Pamiętaj, aby przewód z wtykiem był podłączony do szybkozłączca przed montowaniem reduktora do punktu.

**CZĘŚCI ZAMIENNE**

L.P.	Nazwa Części	Indeks Katalogowy
1	Manometr /0-1MPa/ nr 31140917 *MRI*	2.3/03/01
2	Szybkozłącze SKG O <sub>2</sub> /AGA/ /M10x1/, /G1/4/, /G3/8/	7.0/00/00
3	Szybkozłącze SKG AIR/ AGA/ /M10x1/, /G1/4/, /G3/8/	7.1/00/00
4	Szybkozłącze SKG N <sub>2</sub> O /AGA/ /M10x1/, /G1/4/, /G3/8/	7.2/00/00
5	Szybkozłącze SKG CO <sub>2</sub> /AGA/ /M10x1/, /G1/4/, /G3/8/	7.3/00/00
6	Zestaw napr. reduktora FRL0 Seria MINI T580000000000	2.19/00/03
7	Zestaw napr. reduktora FRL0 T570000040000	2.19/00/02